

FERTIGUNGSANWEISUNG

FÜR DIE EINARBEITUNG VON ORTHOPÄDISCHEN EINLAGEN IN SICHERHEITSSCHUHEN GEMÄSS DGUV REGEL 112-191

Diese Fertigungsanweisung definiert die einzelnen Arbeitsschritte und legt die zu verwendenden Materialkomponenten fest, die als orthopädische Einlagen für ELTEN-Sicherheitsschuhe verwendet werden dürfen. Die Anweisung ist notwendig, um die Konformität mit der EG-Baumusterprüfbescheinigung auch noch nach Einarbeitung der orthopädischen Einlage zu gewährleisten. Bei Abweichung der Fertigung von dieser Anweisung erlischt die Gültigkeit der EG-Baumuster-Prüfbescheinigung und es besteht Haftungsrisiko!

ARBEITSSCHRITTE UND MATERIALKOMPONENTEN

- Diese Fertigungsanweisung gilt für den Einsatz der orthopädischen Weichpolster-Rohlinge der Firma Schein Orthopädie Service KG
 - a) Artikel 97-2778-799 (ESD-fähig, mit Perforation, ohne Deckmaterial als langsohlige Einlage). Diese orthopädische Einlage kann für die Artikel der Produktgruppe ELTEN Biomex Protection® (1. Generation) verwendet wird.
 - b) Artikel 785 (ESD-fähig, mit Perforation, mit und ohne Deckmaterial, als langsohlige Einlage) für die Artikel der Produktgruppen ELTEN Biomex Dynamics, ELTEN Biomex Protection® (1. Generation), ELTEN Business, ELTEN Dimension Pro, ELTEN Ergo-Active, ELTEN L10, ELTEN Miss L10, ELTEN New Classics, ELTEN Nova, ELTEN Nova-Fit, O by ELTEN, ELTEN Safeguard, ELTEN Safety-Grip, ELTEN Specials, ELTEN Trainers, ELTEN Wellmaxx, ELTEN White und LOWA Work Collection.
- Die aktuellen ELTEN Artikel für die diese Zuordnung gilt, finden Sie auf der Folgeseite.
- Basisprodukt ist der serienmäßig gefertigte Schuh aus dem zertifizierten ELTEN Sortiment.

ARTIKEL 97 2778-799:

- Der Weichpolster-Rohling kann entsprechend der gewünschten Fußbettung beschliffen werden. Die Materialstärke dieser Einlage darf im Stahlkappenbereich maximal 3,0 mm betragen.
- Die Einlage darf nicht mit anderen Materialien beschichtet werden, um die Bauhöhe und Antistatikwirkung der Einlage weiterhin zu gewährleisten.

ARTIKEL 785

- Der Weichpolster-Rohling kann entsprechend der gewünschten Fußbettung beschliffen werden. Die Materialstärke dieser Einlage darf im Stahlkappenbereich maximal 3,0 mm betragen.
- Für die Produktgruppen ELTEN Biomex Dynamics, ELTEN Biomex Protection® (1. Generation), ELTEN Business, ELTEN Dimension Pro, ELTEN Ergo-Active, ELTEN L10, ELTEN Miss L10, ELTEN New Classics, ELTEN Nova-Fit, O by ELTEN, ELTEN Safeguard, ELTEN Safety-Grip, ELTEN Specials, ELTEN Trainers, ELTEN White, ELTEN Wellmaxx und LOWA Work Collection kann diese als langsohlige orthopädische Einlage eingearbeitet werden.
- Grundsätzlich darf die orthopädische Einlage nur mit dem von der Firma Schein Orthopädie Service KG vorgeschriebenen Klebstoff und Deckmaterial beschichtet werden, um die Bauhöhe und Antistatikwirkung der Einlage weiterhin zu gewährleisten. Die Firma Schein Orthopädie Service KG stellt diese Materialkomponenten durch den bestellbaren Bausatz oder auch einzeln bereit.

KENNZEICHNUNG

- Die orthopädische Veränderung ist im Schuh unterhalb der orthopädischen Einlage entsprechend durch das verändernde Organ zu kennzeichnen:
 - a) mit Name des Herstellers (Name des Orthopädiebetriebes)
 - b) mit der Typnummer (siehe nachfolgende Tabelle)
- Firma Schein Orthopädie Service KG stellt diese Materialkomponenten durch den bestellbaren Bausatz oder auch einzeln bereit.



FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG MIT DEN EINLAGEN DER SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
97 2778-799	BIOMEX PROTECTION®	63331	DINO black S3	142
EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	712551	IMPULSE green Easy ESD S1P	262
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	722551	IMPULSE green Low ESD S1P	262
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	762551	IMPULSE green Mid ESD S1P	262
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	71245	IMPULSE grey Easy ESD S1	259
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	72245	IMPULSE grey Low ESD S1	259
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	76245	IMPULSE grey Mid ESD S1	259
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	72271	REACTION grey Low ESD S3	369
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	76271	REACTION grey Mid ESD S3	369
785 mit Varianten	BIOMEX DYNAMICS	72265	IMPULSE blue Low ESD S1	367
785 mit Varianten	BIOMEX PROTECTION	63331	DINO black S3	142
785 mit Varianten	BIOMEX PROTECTION	765421	RENZO Biomex GTX® ESD S3 CI	27
785 mit Varianten	BUSINESS	74304	OFFICER Lady ESD S2	22
785 mit Varianten	BUSINESS	726961	RONNY ESD S3	56
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	71733	AMBITION blue Easy ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72733	AMBITION blue Low ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76733	AMBITION blue Mid ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72752	AMBITION BOA® Low ESD S2	18
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76752	AMBITION BOA® Mid ESD S2	18
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72742	DESIRE Low ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76742	DESIRE Mid ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72721	DUSTIN BOA® Low ESD S3	75
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	727821	HORIZON Low ESD S3	75
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	727921	HORIZON M Low ESD S3	75
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	767821	HORIZON Mid ESD S3	75
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76643	MOTION Mesh Mid ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72944	RUNABOUT Easy ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72955	RUNABOUT Low ESD S2	18
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76955	RUNABOUT Mid ESD S2	18
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72753	RUSHER Low ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76753	RUSHER Mid ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76933	RUNABOUT Air ESD S1	13
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	72285	REACTION blue Low ESD S2	18
785 mit Varianten	DIMENSION PRO	76285	REACTION blue Mid ESD S2	18

Schein Orthopädie Service KG

Hildegardstr. 5
42897 Remscheid

Tel.: +49 (0) 21 91 910-0
Fax: +49 (0) 21 91 91028-100

info@schein.de
www.schein.de



FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG MIT DEN EINLAGEN DER SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7238401	ADAM ESD S1 Typ 1	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7238402	ADAM ESD S1 Typ 2	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7238403	ADAM ESD S1 Typ 3	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7207701	GRANT blue Low ESD S1 Typ 1	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7207702	GRANT blue Low ESD S1 Typ 2	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7207703	GRANT blue Low ESD S1 Typ 3	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7225201	GRANT red Low ESD S1 Typ 1	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7225202	GRANT red Low ESD S1 TYP 2	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7225203	GRANT red Low ESD S1 TYP 3	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	257201	JAN grey S1 Typ 1	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	257202	JAN grey S1 Typ 2	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	257203	JAN grey S1 Typ 3	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7215401	MATS ESD S2 Typ 1	128
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7215402	MATS ESD S2 Typ 2	128
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7247101	ROB ESD S3 Typ 1	93
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7247102	ROB ESD S3 Typ 2	93
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7247103	ROB ESD S3 Typ 3	93
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7215403	MATS ESD S2 Typ 3	128
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7647101	RUBEN ESD S3 Typ 1	93
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7647102	RUBEN ESD S3 Typ 2	93
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	7647103	RUBEN ESD S3 Typ 3	93
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	727301	SAMMY ESD S1 Typ 1	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	727302	SAMMY ESD S1 Typ 2	127
785 mit Varianten	ERGO-ACTIVE	727303	SAMMY ESD S1 Typ 3	127
785 mit Varianten	L10	761021	AZUR Mid ESD S3	11
785 mit Varianten	L10	721051	BREEZER black Low ESD S1P	11
785 mit Varianten	L10	761051	BREEZER black Mid ESD S1P	11
785 mit Varianten	L10	721061	CHECKER Low ESD S3	11
785 mit Varianten	L10	72109	BREEZER grey Low ESD S1	19
785 mit Varianten	L10	722081	DELUXE Low ESD S3	299
785 mit Varianten	L10	762081	DELUXE Mid ESD S3	299
785 mit Varianten	L10	761091	EMOTION ESD S3	11
785 mit Varianten	L10	72071	GHOST Low ESD S3	265
785 mit Varianten	L10	76071	GHOST Mid ESD S3	265
785 mit Varianten	L10	72110	MAROON Low ESD S2	10
785 mit Varianten	L10	72112	ONYX Low ESD S2	10

Schein Orthopädie Service KG

Hildegardstr. 5
42897 Remscheid

Tel.: +49 (0) 21 91 910-0
Fax: +49 (0) 21 91 91028-100

info@schein.de
www.schein.de



FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG MIT DEN EINLAGEN DER SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
785 mit Varianten	L10	72141	PHIL ESD S1P	11
785 mit Varianten	L10	72106	SENSATION Low ESD S2	10
785 mit Varianten	L10	76106	SENSATION Mid ESD S2	10
785 mit Varianten	L10	72201	SENSATION Up Low ESD S3	299
785 mit Varianten	L10	72322	PURE Easy ESD S1	37
785 mit Varianten	L10	72312	PURE Slipper Low ESD S2	38
785 mit Varianten	L10	76201	SENSATION Up Mid ESD S3	299
785 mit Varianten	L10	721081	SHADOW Low ESD S3	11
785 mit Varianten	L10	761081	SHADOW Mid ESD S3	11
785 mit Varianten	L10	72123	SKATER ESD S2	10
785 mit Varianten	L10	72125	STRIKE Low ESD S2	297
785 mit Varianten	L10	76125	STRIKE Mid ESD S2	297
785 mit Varianten	L10	721071	VINTAGE Low ESD S3	11
785 mit Varianten	L10	761071	VINTAGE Mid ESD S3	11
785 mit Varianten	LOWA WORK	5940	INNOX Work GTX® blue Mid S3	275
785 mit Varianten	LOWA WORK	5330	INNOX Work GTX® grey Lo S3	275
785 mit Varianten	LOWA WORK	5930	INNOX Work GTX® grey Mid S3	275
785 mit Varianten	LOWA WORK	5303	INNOX Work GTX® lime Lo S3	275
785 mit Varianten	LOWA WORK	5903	INNOX Work GTX® lime Mid S3	275
785 mit Varianten	LOWA WORK	5440	INNOX Work GTX® blue Lo S3	275
785 mit Varianten	MISS L10	74121	BREEZER Lady black Low ESD S1P	214
785 mit Varianten	MISS L10	74231	CHECKER Lady Mid ESD S3	214
785 mit Varianten	MISS L10	74171	GHOST Lady Low ESD S3	241
785 mit Varianten	MISS L10	74422	PURE Lady Easy ESD S1	239
785 mit Varianten	MISS L10	74106	SENSATION Lady Low ESD S2	213
785 mit Varianten	MISS L10	74206	SENSATION Lady Mid ESD S2	213
785 mit Varianten	MISS L10	74151	VINTAGE Lady black Low ESD S3	214
785 mit Varianten	MISS L10	74251	VINTAGE Lady black Mid ESD S3	214
785 mit Varianten	MISS L10	74101	VINTAGE Lady Low ESD S3	214
785 mit Varianten	MISS L10	74201	VINTAGE Lady Mid ESD S3	214
785 mit Varianten	MISS L10	74271	GHOST Lady Mid ESD S3	241
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	76685	BEN ESD S2	316
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	72685	BRUNO ESD S2	316
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	716271	LASLO ESD S1P	318
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	716281	LEANDER Easy ESD S1P	318
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	72623	LEN ESD S2	316

Schein Orthopädie Service KG

Hildegardstr. 5
42897 Remscheid

Tel.: +49 (0) 21 91 910-0
Fax: +49 (0) 21 91 91028-100

info@schein.de
www.schein.de



FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG MIT DEN EINLAGEN DER SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	726231	LEN ESD S3	318
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	72628	LEROY Low ESD S2	316
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	76628	LEROY Mid ESD S2	316
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	76623	LEX ESD S2	316
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	766231	LEX ESD S3	318
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	766241	LEX Steel ESD S3	317
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	726281	LEROY Low ESD S3	317
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	766281	LEROY Mid ESD S3	317
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	72670	PETER ESD S1	315
785 mit Varianten	NEW CLASSICS	726241	LEN Steel ESD S3	317
785 mit Varianten	NOVA	74801	IMPULSE Lady aqua Easy ESD S1P	323
785 mit Varianten	NOVA	74811	IMPULSE Lady aqua Low ESD S1P	323
785 mit Varianten	NOVA	74740	NORA ESD S1	230
785 mit Varianten	NOVA	74751	LINDA red Low ESD S3	322
785 mit Varianten	NOVA	74761	LINDA red Mid ESD S3	322
785 mit Varianten	NOVA	74770	MAJA Easy ESD S1	320
785 mit Varianten	NOVA	74780	MAJA Low ESD S2	321
785 mit Varianten	NOVA	74790	MAJA Mid ESD S2	321
785 mit Varianten	NOVA	74710	MILA aqua Easy ESD S1	320
785 mit Varianten	NOVA	74720	MILA aqua Low ESD S1	320
785 mit Varianten	NOVA	74730	MILA aqua Mid ESD S1	320
785 mit Varianten	NOVA	74490	KARA black ESD S1	320
785 mit Varianten	NOVA	74820	MIEKE Low ESD S2	321
785 mit Varianten	NOVA	74831	IMPULSE Lady BOA® aqua Low ESD S1P	323
785 mit Varianten	NOVA	74841	IMPULSE Lady BOA® aqua Mid ESD S1P	323
785 mit Varianten	NOVA	74771	MAJA Easy ESD S1P	323
785 mit Varianten	NOVA	74781	MAJA Low ESD S3	323
785 mit Varianten	NOVA	74791	MAJA Mid ESD S3	323
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74575	NEELE Low ESD S1	217
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74576	NEELE Mid ESD S1	217
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74541	NELLI Easy ESD S1P	219
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74551	NELLI Low ESD S3	219
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74561	NELLI Mid ESD S3	219
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74511	NURIA Easy ESD S1P	219
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74521	NURIA Low ESD S3	219
785 mit Varianten	NOVA-FIT	74531	NURIA Mid ESD S3	219

Schein Orthopädie Service KG

Hildegardstr. 5
42897 Remscheid

Tel.: +49 (0) 21 91 910-0
Fax: +49 (0) 21 91 91028-100

info@schein.de
www.schein.de



FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG MIT DEN EINLAGEN DER SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
785 mit Varianten	O BY ELTEN	92110	MAROON Low ESD 02	5
785 mit Varianten	O BY ELTEN	92112	ONYX Low ESD 02	5
785 mit Varianten	SAFEGUARD	728441	AMBITION AL Low ESD S3	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	768441	AMBITION AL Mid ESD S3	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	76521	JOSCHI ESD S3 CI	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	76531	JOSCHI GTX® ESD S3 CI	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	768551	SANDER AL ESD S3	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	768531	SANDER BOA® ESD S3	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	727551	SCOTT AL ESD S1P	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	727651	SCOTT BOA® ESD S1P	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	728551	SENEX AL ESD S3	284
785 mit Varianten	SAFEGUARD	728531	SENEX BOA® ESD S3	284
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	726842	RENZO Low ESD S2	17
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	68461	JORIS GTX® S3 CI	91
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	60561	LUTZ S3 HI	91
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	65461	RENZO D30® Mid S3	91
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	67471	RENZO Glass S3 CR	174
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	765451	RENZO GTX® Mid ESD S3 CI	27
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	65451	RENZO GTX® PU S3 CI	27
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	65481	RENZO GTX® XW S3 CI	203
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	65491	RENZO GTX® XXW S3 CI	203
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	725841	RENZO Low ESD S3	27
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	765841	RENZO Mid ESD S3	27
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	764751	RENZO S High ESD S3 HI	91
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	726862	RENZO XW Low ESD S2	207
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	725861	RENZO XW Low ESD S3	203
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	765861	RENZO XW Mid ESD S3	203
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	726882	RENZO XXW Low ESD S2	207
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	725881	RENZO XXW Low ESD S3	203
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	765881	RENZO XXW Mid ESD S3	203
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	721191	TILL Low ESD S3 HI	44
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	761191	TILL Mid ESD S3 HI	44
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	72061	TOBY Low ESD S3 HI	44
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	76061	TOBY Mid ESD S3 HI	44
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	86771	WILL S3 CI	27
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	765481	RENZO GTX® XW Mid ESD S3 CI	203

Schein Orthopädie Service KG

Hildegardstr. 5
42897 Remscheid

Tel.: +49 (0) 21 91 910-0
Fax: +49 (0) 21 91 91028-100

info@schein.de
www.schein.de



FERTIGUNGSANWEISUNG

ARTIKELAUSWAHL FÜR DIE VERARBEITUNG MIT DEN EINLAGEN DER SCHEIN ORTHOPÄDIE SERVICE KG

EINLAGE	PRODUKTGRUPPE	ARTIKELNUMMER	NAME	TYPENNUMMER
785 mit Varianten	SAFETY-GRIP	765491	RENZO GTX® XXW Mid ESD S3 CI	203
785 mit Varianten	SPECIALS	64461	CARL S3 HI	174
785 mit Varianten	TRAINERS	768571	SANDER Pro GTX® ESD S3	56
785 mit Varianten	TRAINERS	728571	SENEX Pro GTX® ESD S3	56
785 mit Varianten	TRAINERS	72170	MOTION Air ESD S1	311
785 mit Varianten	TRAINERS	72182	MOTION Low ESD S2	312
785 mit Varianten	TRAINERS	76182	MOTION Mid ESD S2	312
785 mit Varianten	TRAINERS	76872	SANDER ESD S2	312
785 mit Varianten	TRAINERS	768321	SANDER ESD S3	56
785 mit Varianten	TRAINERS	72121	SCOTT ESD S1P	56
785 mit Varianten	TRAINERS	726661	SCOTT Pro ESD S1P	56
785 mit Varianten	TRAINERS	72872	SENEX ESD S2	312
785 mit Varianten	TRAINERS	71872	SCOTT ESD S1	311
785 mit Varianten	TRAINERS	728321	SENEX ESD S3	56
785 mit Varianten	TRAINERS	72860	SKY grey-yellow ESD S1	311
785 mit Varianten	TRAINERS	72825	SUNNY ESD S1	49
785 mit Varianten	TRAINERS	72151	FINN green Low ESD S1P	56
785 mit Varianten	TRAINERS	72622	TRIBUTE black Low ESD S2	312
785 mit Varianten	WELLMAXX	729410	LENNOX Low ESD S1	302
785 mit Varianten	WELLMAXX	729425	LOGAN blue Low ESD S1	302
785 mit Varianten	WELLMAXX	729420	LOGAN red Low ESD S1	302
785 mit Varianten	WELLMAXX	729440	MILOW Low ESD S2	303
785 mit Varianten	WELLMAXX	729430	TYLER Low ESD S1	302
785 mit Varianten	WELLMAXX	769451	MILES Mid ESD S3	304
785 mit Varianten	WELLMAXX	729451	MILES Low ESD S3	304
785 mit Varianten	WELLMAXX	719460	ETHAN Easy ESD S1	302
785 mit Varianten	WHITE	720171	WHITE Strap Low ESD S3	212
785 mit Varianten	WHITE	760171	WHITE Strap Mid ESD S3	212

Schein Orthopädie Service KG

Hildegardstr. 5
42897 Remscheid

Tel.: +49 (0) 21 91 910-0
Fax: +49 (0) 21 91 91028-100

info@schein.de
www.schein.de

